

Chirana

Způsob použití injekční stříkačky pro jedno použití



STERILE EO




- Popis:** Injekční stříkačky pro jedno použití. Sterilní, netoxické, nepyrogenní.
Účel určení: Na podávání injekcí a odběr krve a tělních tekutin u pacientů.
 Při postupech FNA a FNNA doporučuji použít 3-dílné stříkačky CHIRANA.
Kontraindikace: Zdravotnický prostředek by se neměl používat jinak než je uvedený účel použití.
 Zdravotnický prostředek by se neměl používat pro vysoko viskózní kapalinu.



1. Před použitím ověřte platnost sterility, úplnost balení, číslo šarže a datum expirace;
2. Stříkačky mají být použity okamžitě po otevření jednotkového balení a znehodnoceny po použití;
3. Pokud je jednotkové balení poškozené nebo je po uplynutí data expirace, jeho použití není povoleno;
4. Použít ho smí jen kvalifikovaný lékař nebo zdravotník;
5. Pouze na jedno použití. Po jednom použití soupravu ihned zlikvidujte;
6. Tento zdravotnický prostředek neobsahuje ftaláty DEHP;
7. Opakovaná sterilizace nebo opakované použití může způsobit infekci nebo vzájemné křížové působení.
8. Pokud se po naplnění stříkačky roztok zakalí, zbarví nebo se objeví pevné částice, nepoužívejte dále stříkačku, informujte výrobce a pokud je to možné, zašlete stříkačku výrobci.



1. Před použitím překontrolujte neporušenost každého jednotlivého balení. Pokud je jednotkové balení poškozené, nepoužijte ho!
2. Před použitím otevřete jednotkové balení;
3. Každá použitá stříkačka se považuje za kontaminovanou a okamžitě po použití musí být zlikvidovaná v schváleném kontejneru na biologický odpad, aby se zabránilo infekci;
4. Po jednom použití ho bezpečně zlikvidujte, aby ste zabránili infekci.

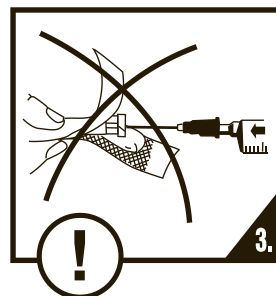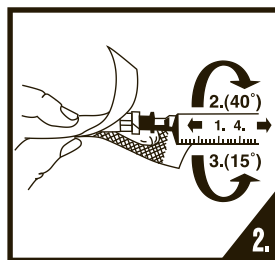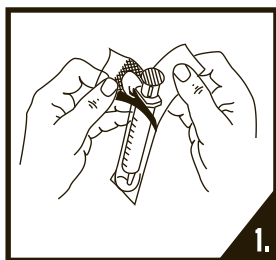

Pozor



Viz návod k použití



Referenční číslo výrobku



Pouze na jedno použití



Číslo šarže



Datum výroby



Spotřebujte do/Datum spotřeby



Sterilizováno etylen oxidem



Vyrobena v



Bez pyrogenů



Výrobek bez LATEXU



Nepoužívejte, pokud je jednotkové balení poškozené



Chraňte před slunečním zářením



Omezení teploty



Chraňte před deštěm



Křehké, zacházet opatrně

